

Корсет поясничный

ARC9202

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Корсет изготовлен из высококачественного материала, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Болевой синдром в пояснично-крестцовом отделе позвоночника различной этиологии.
- Реабилитационный период после травм и операций в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
- Профилактика травм и заболеваний пояснично-крестцового отдела позвоночника при физических нагрузках.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Анатомический дизайн изделия способствует плотному прилеганию к телу, что обеспечивает удобство и комфорт при ношении.
- Специальное плетение по краям корсета, позволяет избежать скручивания краев и предупреждает сдавливание мягких тканей.
- Интегрированная петля помогает зафиксировать изделие без дополнительных усилий и посторонней помощи.
- Наличие ребер жесткости обеспечивает плотное прилегание изделия, что повышает эффективность его фиксирующего воздействия.
- Корсет изготовлен по уникальной технологии трехмерной вязки, что обеспечивает плотное прилегание с учетом индивидуальных анатомических особенностей, способствуя дополнительному компрессионному воздействию.
- Материал корсета является влаго- и воздухопроницаемым.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие рекомендуется надевать на нижнее белье, лежа на спине на ровной жесткой или полужесткой поверхности. Изделие необходимо надевать широкой частью на поясницу. На глубоком вдохе при втянутом животе необходимо зафиксировать пояс на животе с помощью застежки-липучки. Отрегулируйте прилегание изделия, учитывая особенности фигуры.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

От 2 до 12 часов в сутки в зависимости от состояния здоровья и рекомендаций врача. Индивидуальный режим и сроки использования определяет врач. Необходимость применения изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не прекращать использование изделия без согласования с врачом.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи, беременность являются противопоказаниями для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области поясницы.





Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату талии согласно таблице:

Область измерения	Размеры				
	S	M	L	XL	XXL
Обхват талии, см	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120



При измерении обхвата талии сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ

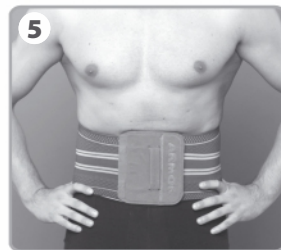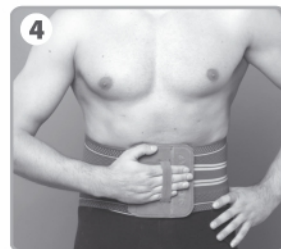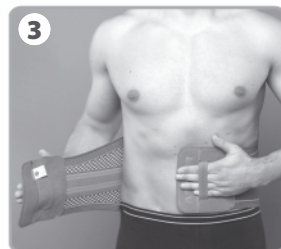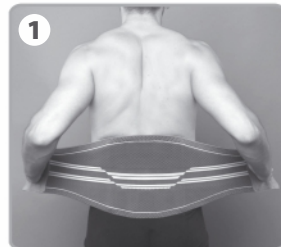

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

Состав: полиамид 55%, эластан 45%, застежка VELCRO (липучка), 4 металлических ребра жесткости.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: см. на упаковке.

CE ISO 9001
ISO 13485



Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик Лтд. Сти. Джихангир Мах. Сехит Гиядеер Явуз Бахар Сок. №4 Мираббо СанайСитези Д: Блок Кат: 3 Амбарли, Авджилар, Стамбул, Турция.