

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перед стиркой достать металлические пластины — рёбра жесткости. Использовать ручную стирку мягкими моющими средствами при температуре не выше +30°C. Во время стирки не тереть и не выкручивать. При сушке избегать контакта с прямыми источниками тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке. Не подвергать воздействию высоких температур (выше +120°C).

Состав: хлопок 40%, нейлон 30%, поливискон 15%, эластан 15%, застежка Velcro (липучка), 2 металлических ребра жесткости.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

Срок хранения: 5 лет от даты изготовления. После окончания срока хранения производитель не гарантирует сохранение достаточной эластичности изделия.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты покупки.

Дата производства: см. на упаковке.


Размер: см. на упаковке.



Производитель: Хегели Ортопедик Урунлер Сан. Ве Тик. Лтд. Сти. Джихангир Мах. Сехит ПиядеЕр Явуз Бахар Сок. Но:4 Мираббо СанаиСитези Д. Блок Кат. 3 Амбарли, Авджилар, Стамбул, Турция.

www.prolife-orto.com

Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

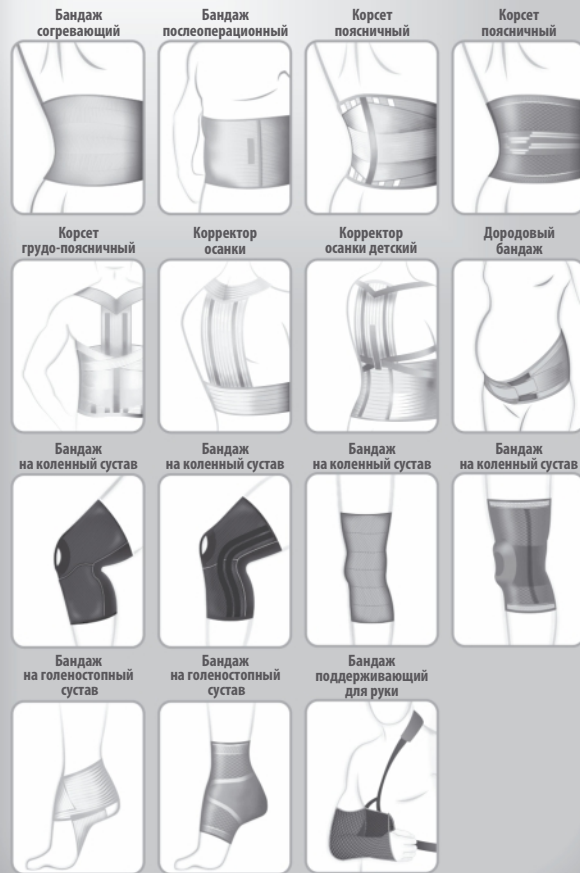

Корректор осанки детский

ARC1161

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Корректор осанки изготовлен из высококачественного материала с содержанием 40% хлопка, что делает использование изделия максимально безопасным и комфортным. Наличие ребер жесткости обеспечивает плотное прилегание изделия, что повышает эффективность его фиксирующего воздействия. Высокое качество изделия подтверждено международными и европейскими сертификатами на соответствие стандартам качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Профилактика различных форм нарушения осанки у детей.
- Искривление грудного отдела позвоночника (кифозы, сколиозы I-II степени)
- Реабилитация после травм и операций на грудном и поясничном отделах позвоночника

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Ребра жесткости помогают выровнять спину и обеспечить правильную осанку.
- Корректор осанки имеет дополнительные эластичные ленты, которые усиливают фиксацию позвоночника и облегчают подгонку изделия по размеру.
- Мягкая манжета на плечевом ремне равномерно распределяет нагрузку и не натирает кожу.

- Корректор осанки изготовлен из воздухопроницаемого материала, который обеспечивает комфорт при использовании в любое время года. Прочность и эластичность материала обеспечивает необходимую фиксацию и поддержку.
- Натуральное волокно в составе изделия обеспечивает воздухопроницаемость и мягкое прилегание, повышает стойкость изделия при носке.

ПРИМЕНЕНИЕ

Изделие рекомендуется надевать на нижнее белье. Необходимо закрепить изделие на животе с помощью застежки-липучки. Нужно убедиться, что ребра жесткости находятся симметрично относительно позвоночного столба. Затем следует пропустить ремни под мышками и перекрестить их на спине, далее при расправленных плечах зафиксировать эластичные ремни под грудной клеткой впереди.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Дети 6–10 лет — от 1–2 часов в сутки, постепенно увеличивая до 8–10 часов. Дети 11–16 лет — от 2–4 часов, постепенно увеличивая до 10–12 часов. Индивидуальный режим и сроки использования определяет врач. Необходимость применения изделия дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не прекращать использование изделия без согласования с врачом.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования изделия проконсультируйтесь с врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия. Не допускается эксплуатация поврежденного изделия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местные заболевания кожи являются противопоказанием для применения изделия. При гиперчувствительности к компонентам материала изделие необходимо надевать на нижнее белье. Не надевать изделие при использовании согревающих мазей в области поясницы.

СХЕМА НАДЕВАНИЯ



СХЕМА НАДЕВАНИЯ



Подбирать размер необходимо непосредственно по обхвату талии согласно таблице:

Область измерения	Размеры
	UNI
Обхват талии, см	50 – 70



При измерении обхвата талии сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, не нужно слишком ее натягивать или ослаблять.